



Le DD Shade Guide - **la solution individuelle orientée cabinet dentaire** pour déterminer la teinte avec le matériau de restauration zircon **de votre choix** ! Fraisez et transformez les dents en oxyde de zirconium dans votre laboratoire et conservez ainsi le résultat grâce à votre expérience de laboratoire et vos méthodes de travail.

CONTENU DU SET



Support DD Shade Guide (8er ou 16er)



Tiges et anneaux de fixation
(quantité pour chaque couleur)



Fichier Stl. sur la clé USB


ETAPE 1: SUR LA CLÉ USB

Sur la clé USB, il y a un fichier stl. de la dent du teintier. Copier le fichier plusieurs fois, puis les ajouter au dossier d'importation de votre logiciel de FAO.


ETAPE 2: DANS LE PROGRAMME CAM

Placez le disque comme d'habitude dans votre logiciel de FAO avec les facteurs d'expansion (ou de contraction). Positionnez la dent en zirconium dans le disque virtuel. Pour la zirconium blanche ou monochrome (couleur unie), un disque de 14 mm suffit. Pour les disques multicouches DD, nous recommandons le placement dans un disque d'une hauteur de 18 mm pour un résultat idéal.

Exemple : Placement de la dent .stl dans un disque en oxyde de zirconium multicouche avec affichage du dégradé de couleurs dans DD smart CAM 2.0 par workNC Dental.

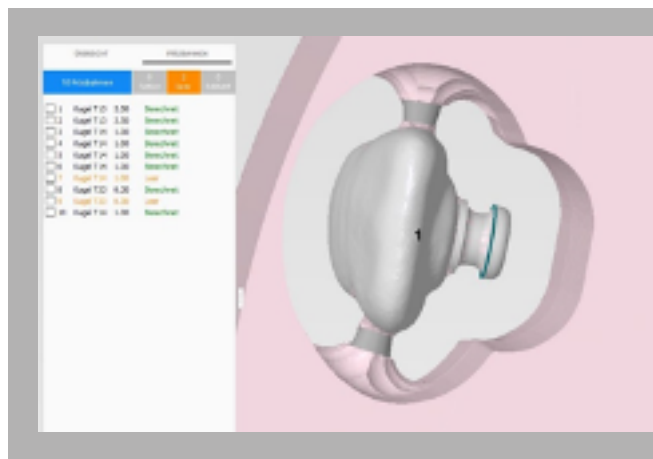

connexion approximale avec deux connecteurs au milieu de la hauteur. Les connecteurs ont un Ø 2,0 mm sur l'objet. Une conicité de 10° et un positionnement à 90° de la surface vestibulaire permettent à la fraise de s'approcher librement du "point d'attache".

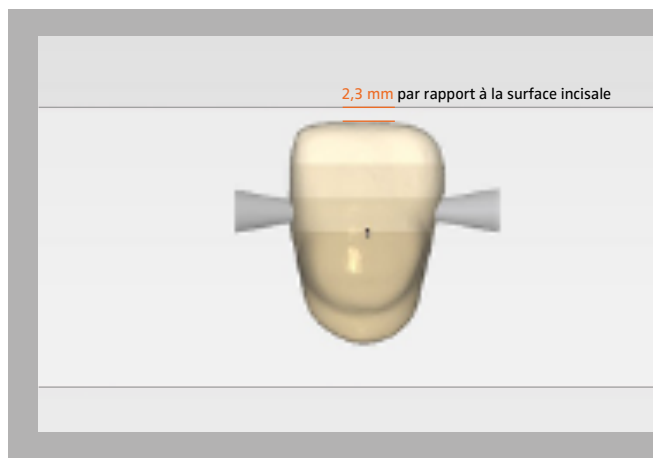

Si vous créez un guide des teintes DD avec nos oxydes de zirconium multicouches DD, vous devez respecter le positionnement de la hauteur de placement avec une attention particulière dans votre logiciel de FAO.

Une bonne valeur indicative est une distance d'environ 2,3 mm par rapport à la surface incisive de la pièce brute. Veuillez noter qu'un positionnement élevé entraîne un plus grand éclaircissement. Avec le DD cubeX2® et le DD cube ONE® hautement translucide, cela peut également entraîner un éclaircissement du corps de la dent.



Note: De plus amples informations sont disponibles dans notre recommandation de placement, que nous disponibilisons dans notre centre de téléchargement.

www.dentaldirekt.de/de/downloads

ETAPE 3: FINITIONS DE LA DENT EN ZIRCON

VIDEO



Travail

Séparer le travail fraisé du disque et meuler/lisser les connecteurs comme d'habitude.

La fraiseuse de la machine ne peut pas fraiser des angles négatifs de 90° et laisse ainsi une zone arrondie. La tige de fixation doit être manuellement retravaillée et approfondie quelque peu, ceci afin de corriger l'angle manquant.

> cliquez sur l'image pour lire la vidéo



Frittage

Les couronnes sont placées sur le bord incisif et la tige de fixation (position stable).

Cela permet d'éviter que la couronne ne tombe pendant le processus de frittage (la chute pourrait éventuellement entraîner des fissures).



Avertissement: Frittez les dents en zircon selon les instructions du fabricant. Veuillez vous référer à nos instructions de frittage séparées.

www.dentaldirekt.de/de/downloads



Coloration

Si aucun disque pré-coloré n'a été utilisé, vous pouvez utiliser nos liquides DD Shade Concept® pour colorer les dents.

Notre astuce: Vous pouvez mettre des effets spéciaux avec les liquides DD Art Elements - non seulement pour les zircons blanches, mais aussi en combinaison avec des constructions faites de disques multicouches DD. Par exemple, l'utilisation de DD Art Elements bleu et/ou violet crée un effet très naturel dans la zone incisale des dents en oxyde de zirconium ML.



Avertissement: Veuillez prendre note de notre mode d'emploi séparé et de la recommandation sur les liquides.

www.dentaldirekt.de/de/downloads

ETAPE 4: FINALISER



Afin de pouvoir garantir une absorption optimale de la couleur, effectuez une finition des dents en zircone avec une glasure
En option, vous pouvez cuire les dents en oxyde de zirconium avec nos couleurs et textures **DD contrast®** en fonction de vos exigences.



Avertissement: Veuillez vous référer à notre mode d'emploi séparé.

www.dentaldirekt.de/de/downloads

ETAPE 5: L'ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS



Placez les dents en zircone sur la surface vestibulaire et les barrettes en métal sur leur face gravée.

Ensuite, il faut relier les dents en zircone aux barrettes à l'aide des anneaux de retenue. Notez ce qui suit, placez l'ouverture des anneaux de retenue contre la tiges de fixation des dents en oxyde de zirconium.



Afin de relier fermement les deux parties, faites glisser l'anneau de fixation sur la tige de la dent en oxyde de zirconium. La dent en oxyde de zirconium reste rotative afin d'être flexible dans le choix des couleurs.

pxFRANCE S.à r.l.

www.px dental.com
+33 (0)4 50 51 17 34
commandes.pxfrance@orange.fr

pxDENTAL SA

www.px dental.com
+41 (0)32 924 21 20
pxdental@pxgroup.com