

Masses DD Contrast	Référence	Description des effets
DD contrast® color		
Couleurs de consistance crémeuse, pour obtenir des effets naturels tels que les mamelons et la translucidité		
Body-colors		
DD contrast® color dentin A	DDCCDA	Couleur de base des nuances A dans la zone du corps
DD contrast® color dentin B	DDCCDB	Couleur de base des nuances B dans la zone du corps
DD contrast® color dentin C	DDCCDC	Couleur de base des nuances C dans la zone du corps
DD contrast® color dentin D	DDCCDD	Couleur de base des nuances D dans la zone du corps
Couleurs mamelons		
Pour imiter les mamelons dans la zone incisive des dents antérieures. Chez certaines personnes, les mamelons apparaissent opaques en 3 bombements. Le bord incisif translucide est situé autour d'eux.		
DD contrast® color mamelon maize	DDCCMM	Jaune. Parfois utilisé pour des effets de fissures vestibulaires.
DD contrast® color mamelon corn	DDCCMC	Jaune clair
DD contrast® color mamelon pink	DDCCMP	Rose. Parfois utilisé en cervical pour imiter une diffusion gingivale rose.
Couleurs effets		
DD contrast® color white	DDCCWH	Pour les effets de couleur blanche sur la dent, imitation des effets de lumière
DD contrast® color vanilla	DDCCVA	Effets d'imitation de la lumière
DD contrast® color halo	DDCCHA	Le bord incisif des dents antérieures est encadré par une ligne beige/brune - Crée une plus grande illusion de profondeur sur le bord incisif
DD contrast® color cervical	DDCCCE	Conçu pour la zone cervicale, souvent plus sombre
DD contrast® color orange	DDCCOR	Pour la zone occlusale
DD contrast® color traces	DDCCTR	Pour colorer des traces intenses, ou dans les espaces interdentaires.
DD contrast® color fissure	DDCCFI	Pour réaliser les sillons occlusaux. Couleur de marquage qui se laisse étirer très précisément
DD contrast® color light gray	DDCCLG	Pour un effet translucide claire, ou pour baisser la valeur lumineuse
DD contrast® color dark gray	DDCCDG	Pour un effet translucide fort
DD contrast® color violet	DDCCVI	Pour augmenter la profondeur d'une zone, ou pour légèrement baisser la valeur lumineuse sans effet gris
DD contrast® color blue	DDCCBL	Pour les dents antérieures, les bords incisifs ont souvent un aspect bleuté
DD contrast® texture		
Masses stables pour la modélisation des structures de surface		
Masses incisives		
DD contrast® texture enamel 59	DDCTE59	Incisal transparent pour recouvrir les faces vestibulaires
DD contrast® texture enamel bleach	DDCTEB	Incisal brillant pour augmenter la luminosité
DD contrast® texture transpa warm fluor	DDCTWF	Incisal d'un ton transparent jaunâtre, pour plus de chaleur dans la zone incisale
Incisifs intensifs		
DD contrast® texture retzius	DDCTRE	Imitation des lignes de croissance
DD contrast® texture opal blue	DDCTOB	Pour un effet bleuté sur les bords incisifs
DD contrast® texture illusion	DDCTIL	Pour la translucidité dans la zone incisive
Dentine		
DD contrast® texture chroma dentin A1	DDCTCDA1	Génère de la chaleur dans la dent, augmente le chroma et la brillance dans la zone A. Augmente l'intensité de la couleur dans la zone cervicale. Aussi si vous avez une couleur de zircone B1 et que vous voulez une couleur de dent A1.
DD contrast® texture chroma dentin B4	DDCTCDB4	Pour augmenter l'intensité de la couleur dans la région cervicale. Génère de la chaleur dans la dent. Aussi appelée «dentine de racine»
DD contrast® texture bleach dentin	DDCTBD	Pour le blanchiment des dents, également dans la région cervicale
Masses spéciales		
DD contrast® texture mask	DDCTMA	Pour masquer la décoloration du moignon. Une masse opaque à appliquer dans l'intrados des couronnes. Prévoir un espace ciment plus grand lors de la modélisation CAO (0.2mm)
DD contrast® texture caninus	DDCTCA	Surtout pour les canines, car elles sont généralement plus colorées
Glaze		
DD contrast® glaze clear	DDCGC	Léger trouble/gris chatoyant pour les patients plus âgés, car leurs dents ont un degré de translucidité plus élevé
DD contrast® glaze clear fluor	DDCGCF	La fluorescence nécessaire est obtenue en particulier dans la zone du corps
Liquides		
DD contrast® standard liquid	DDCSLI	Exclusivement pour l'éclaircissement des «color», en ajoutant du liquide pour une application plus diluée.
DD contrast® texture liquid	DDCTLI	Les textures sont plus stables. Leur consistance peut être ajustée avec précision. Mais vous pouvez l'utiliser pour tous les composants : couleur, texture, glaçage

