

Ihre  
Grundlage  
für  
Ästhetik



Spezielle Primer  
von GC

Für den Gebrauch  
im Dental-Labor


**GC**

# Der dauerhafte Bonder zwischen Keramik und Composite



**CERAMIC PRIMER II** ist ein spezieller Haftvermittler für alle ästhetischen indirekten Restaurationen.

Um eine gute Haftung zu gewährleisten, verwenden Sie CERAMIC PRIMER II für die zusätzliche Applizierung oder Reparatur von **GRADIA PLUS** oder bei der Individualisierung von GRADIA PLUS mit GRADIA PLUS Lustre Paint.

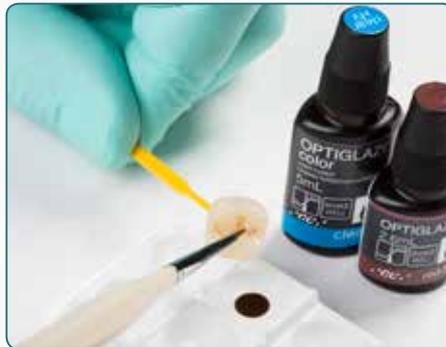

Tragen Sie CERAMIC PRIMER II auf bevor Sie Ihre **CERASMART270**-Restaurationen mit **OPTIGLAZE color** charakterisieren. Für tiefergehende Effekte kann auch eine Cut-Back-Technik in Kombination mit GRADIA PLUS angewendet werden.



CERAMIC PRIMER II ist Ihr bevorzugter Partner, um eine starke Verbindung der Materialien zu garantieren.


Alle Keramiken, auch Zirkonoxid-Gerüste, können mit GRADIA PLUS charakterisiert werden.

# Der Held für alle metallbasierten Gerüste



**METAL PRIMER Z** ist ein einstufiger Kunststoff zu Metall Haftvermittler. Er stellt eine stabile Verbindung zwischen Metallgerüsten und den verschiedensten Materialien auf Acrylbasiscomposites her.

Ein einfach zu verwendender und bewährter Haftvermittler! Bevor Sie Ihr Metallgerüst mit GRADIA PLUS Opaque abdecken, wird mit METAL PRIMER Z eine chemische Verbindung hergestellt.

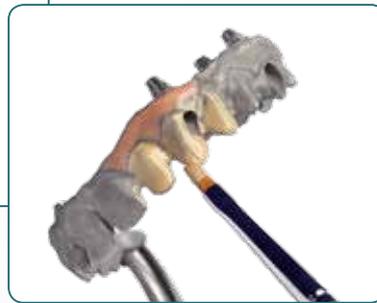

Neben der spezifischen Indikation zur Vorbereitung von metallbasierten Gerüsten kann **METAL PRIMER Z** alternativ auch zur Haftvermittlung auf Zirkonoxid-Gerüsten verwendet werden.

# Die Basis für die Modifikation von Zahnersatz



**Acrylic Primer** erhöht die Haftung zwischen lichthärtenden Composites und herkömmlichen Acrylkunststoffen, die in zahntechnischen Verfahren wie der Modifikation von Prothesenzähnen oder Prothesenbasiskunststoffen verwendet werden.



# Die „all-in-one“-Lösung für Befestigung und Reparatur



**G-Multi PRIMER** dient zur Vorbehandlung von Restaurationen vor der Befestigung mit G-CEM LinkForce oder G-CEM Veneer und kann auch für intraorale Reparaturen verwendet werden. Er enthält drei verschiedene chemische Substanzen für eine perfekte Haftung auf allen Arten von Restaurationen.



008551	CERAMIC PRIMER II, 3ml
008620	CERAMIC PRIMER II Unit Dose, 10x 0,1ml
009295	METAL PRIMER Z, 5ml
901138	GC Acrylic Primer, 6ml
009553	G-Multi PRIMER, 5 ml

CERAMIC PRIMER II, CERASMART270, GC Acrylic Primer, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, GRADIA PLUS, METAL PRIMER Z und OPTIGLAZE color sind Trademarks von GC.

#### **GC EUROPE N.V.**

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

#### **GC Germany GmbH**

Seifgrundstraße 2  
D-61348 Bad Homburg  
Tel. +49.61.72.99.59.60  
Fax. +49.61.72.99.59.66.6  
info.germany@gc.dental  
<http://germany.gceurope.com>

#### **GC AUSTRIA GmbH**

Tallak 124  
A-8103 Gratwein-Strassengel  
Tel. +43.3124.54020  
Fax. +43.3124.54020.40  
info.austria@gc.dental  
<http://austria.gceurope.com>

#### **GC AUSTRIA GmbH**

Swiss Office  
Zürichstrasse 31  
CH-6004 Luzern  
Tel. +41.41.520.01.78  
Fax. +41.41.520.01.77  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

# GC