



# Indications sur les programmes des fours de frittage DEKEMA

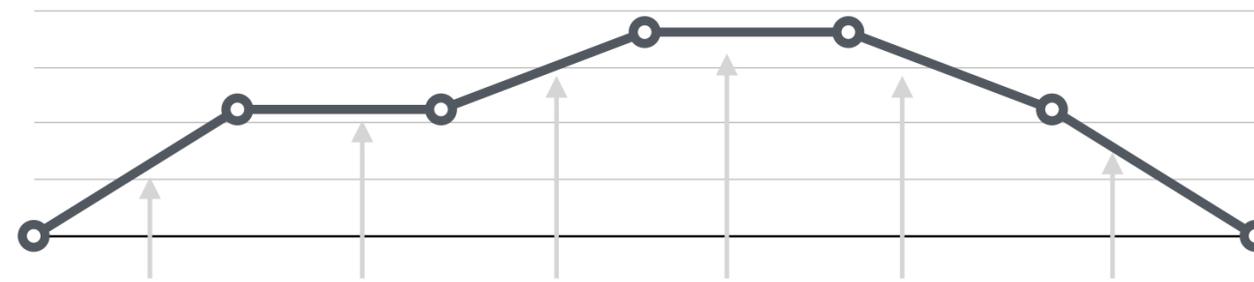

Exemple de programme: C0 L0 T008.A900 L9 T1800 T003.C1450 T7200 T005.C800 T010.C200 C0 L0 T2

Information technique pour le four  
 Paliers  
 Montée ou descente en température.  
 Le temps est indiqué en secondes  
 Pour une valeur de 5,5°/min, arrondir à 6°

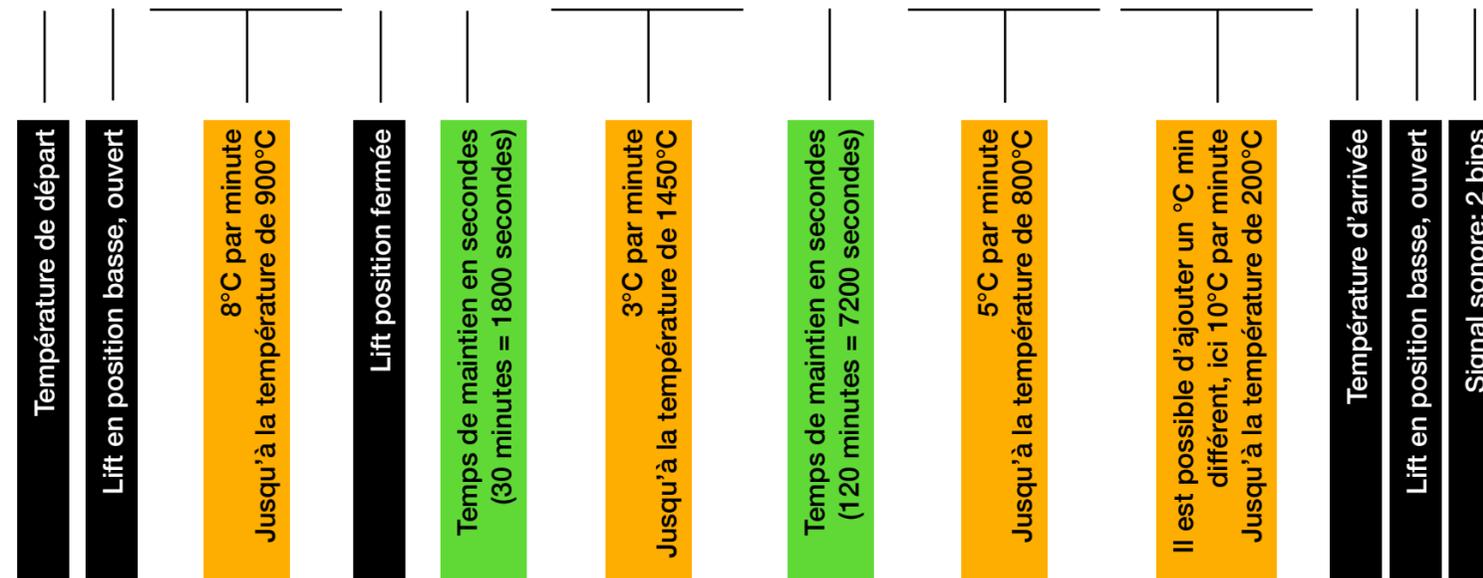

Programme	T°C départ	Lift ouvert	°C/min+température	Lift fermé	Maintien en sec.	°C/min+température	Maintien en sec.	°C/min+température	T°C arrivée	Lift ouvert	Bip de fin
	C0	L0	T008.A900	L9	T1800	T003.C1450	7200	T010.C200	C0	L0	T2

Calcul des données du programme

	Température 1 [°C]	Température 2 [°C]	Taux de chauffe [°C/heure]	Taux de chauffe [°C/minute]	Maintien [minute]	Maintien [seconde] <i>calcul auto</i>	Temps étape [minute]	Temps étape [seconde] <i>calcul auto</i>
Chauffe	20	900	480	8			110	6600
Maintien	900	900			30	1800	30	1800
Chauffe	900	1450	200	3			183	10980
Maintien	1450	1450			120	7200	120	7200
Refroidissement	1450	200	600	10			125	7500